

OPEP dechová rehabilitační pomůcka

Trudell Medical International

Popis

Zdravotnický prostředek Aerobika* OPEP Device je fyzioterapeutická rehabilitační pomůcka, která je určena k čištění dýchacích cest. Náleží do skupiny OPEP (Oscillating Positive Expiratory Pressure) zařízení. Využívá všechny benefity PEP pomůcek, které navíc kombinuje s vibrací. Technika je založena na výdechu proti odporu. Během expirace dochází k vytvoření pozitivního tlaku a vibraci v dýchacích cestách. Tím pomáhá k rozpínání dýchacích cest a následné mobilizaci nadměrného sekretu, čímž přispívá ke zlepšení efektivity dýchání u pacientů s respiračními obtížemi. Pomůcku lze také používat současně s podáním nebulizovaného aerosolového léčiva.



Aktivní pomůcka pro dechovou rehabilitaci

- pomáhá uvolňovat hlen z plic
- brání kolapsu v dýchacích cestách
- zlepšuje výměnu plynů
- zvyšuje vitální kapacitu plic
- snižuje odpor v dýchacích cestách
- přispívá ke změně neproduktivního kašle na produktivní
- lze ji kombinovat s nebulizací/inhalací léčiva

Primární určení pro pacienty:

- schopné generovat výdechový průtok 10 l/min po dobu 3-4 sekund
- s CHOPN
- s bronchiektáziemi
- s cystickou fibrózou

Výhody

- snadné použití, čištění i dezinfekce
- účinné oscilace od začátku do konce výdechu
- frekvence oscilací napodobuje přirozený pohyb řasinek v dýchacích cestách
- nezávislé na poloze pacienta
- možnost regulace výdechového tlaku a vibrací (vhodné i pro děti)
- možnost použití zároveň s inhalátorem
- kód ZP 5019870

Kontraindikace a nežádoucí účinky

Před použitím zdravotnického prostředku Aerobika* OPEP Device je nutné si přečíst informace uvedené v návodu k použití. Kontraindikacemi použití jsou netolerance zvýšené dechové činnosti, nitrolební tlak (ICP) > 20 mm Hg, hemodynamická nestabilita, akutní sinusitida, aktivní hemoptýza (krvácení z plic) a další viz návod k použití.

Další informace

Aerobika* OPEP Device je určena pro jednoho pacienta. Lze ji čistit vodou se saponátem nebo dezinfikovat v parním sterilizátoru, vařením, za pomoci využití parního sáčku určeného do mikrovlnné trouby a dalšími způsoby uvedenými v návodu k použití.

Technická data

rozměry (v x š x h)
hmotnost

109 mm x 115 mm x 38 mm
80 g




Typy produktů

Aerobika* OPEP device (v krabičce, běžná praxe)
Aerobika* OPEP device (v plastovém sáčku, nemocniční praxe)
Aerobika* OPEP with Manometer (s manometrem, nemocniční praxe)

Objednací kód

110501110008
11050191010
11050491010

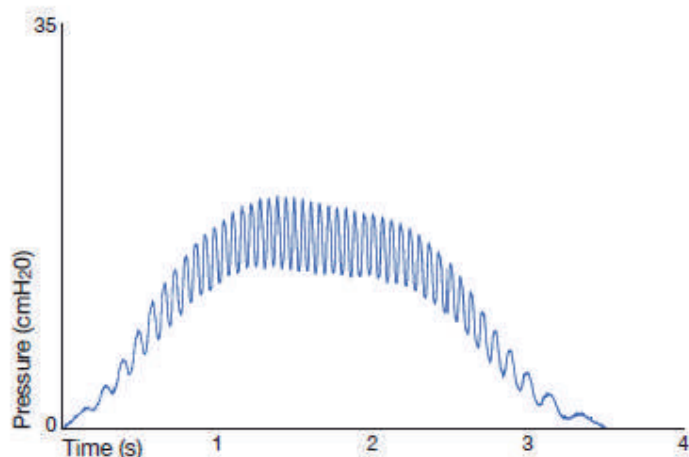

Aerobika* OPEP Device

Oscilace po celou dobu výdechu



AEROBIKA* OPEP Device s manometrem


MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367

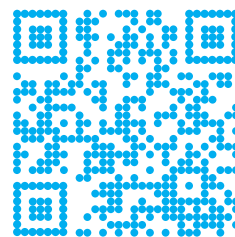

www.mr-diagnostic.cz